

## Onsite Dengue Ag Rapid Test



OnSite Dengue Ag Rapid Test es un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral para la detección cualitativa del antígeno NS1 del dengue (DEN1, 2, 3, 4) en suero, plasma o sangre entera de humanos

### Onsite Dengue Ag Rapid Test


R0063C | Suero/Plasma/Sangre Total

Detecta el antígeno NS1 de los 4 serotipos (DEN1, 2, 3, 4)

Sensibilidad Relativa: 100%, Especificidad Relativa: 98.75%, Acuerdo General: 99.0%

Reactividad cruzada: No se observaron resultados de prueba de dengue falsos positivos en 6 a 10 muestras positivas de los siguientes estados patológicos HIV, HCV, HBV, CHIK, Malaria, Fiebre Tifoidea

El límite de detección es de 0.25 ng/mL determinado sobre el antígeno NS1 recombinante del dengue del serotipo 2 (DEN2)

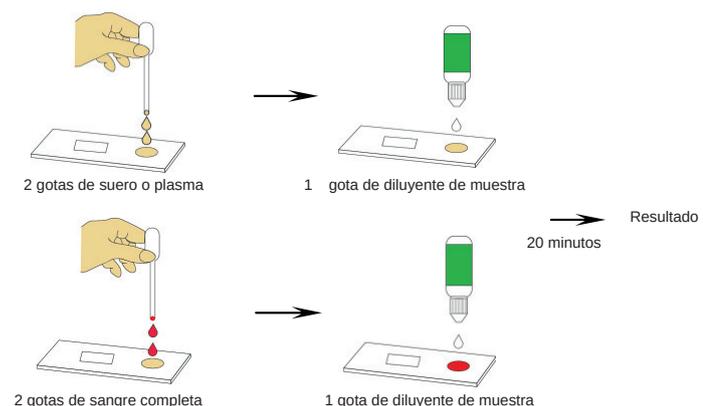


Con el gotero en posición vertical, dispense 2 gotas (aproximadamente 60  $\mu$ L) de suero/plasma o 2 gotas de sangre total en el pozo de muestra asegurándose de que no haya burbujas

Inmediatamente agregue 1 gota (aprox. 30-40  $\mu$ L) de diluyente de muestra con la botella en posición vertical

Los resultados positivos pueden ser visibles en tan solo un 1 minuto

La interpretación final de los resultados debe hacerse entre los 20 a 25 minutos

Venta exclusiva a laboratorios de análisis clínicos. USO PROFESIONAL EXCLUSIVO

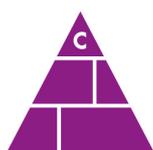

**CROMOION**  
 ABASTECIMIENTO INTEGRAL HOSPITALARIO  
 División Diagnóstico - Biología Molecular

Central: Oporto 6125 - Ciudad de Buenos Aires - Argentina  
 Planta Elaboradora Punta Alta, Prov. de Buenos Aires  
 mail: [reporte@cromoion.com](mailto:reporte@cromoion.com)  
[www.cromoion.com](http://www.cromoion.com)  
 Tel: +54 11 4644-3205/06